

UpDate!

1896 **SCHWERT**
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



Wurzelheber FIG. 77R Root elevator FIG. 77R

Modern Therapy · Modern Instruments

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Wurzelheber FIG. 77R · Root elevator FIG. 77R




Aufgrund der Biegung des Instrumentes ist ein sehr guter Zugang am Approximalkontakt zum 8er Zahn in allen Quadranten möglich. Die feine, gezahnte Spitze erlaubt ein schonendes Luxieren.

The angulation of the instrument secures an excellent access on the approximal contact to tooth no. 8 in all quadrants. The fine serrated tip allows a gentle luxation.



Die feine Maulrandzahnung stellt sicher, dass der Zahn beim Luxieren nicht vom Instrument abgleitet.

The fine serrated edges assure that the tooth will not slide from the instrument during luxation.

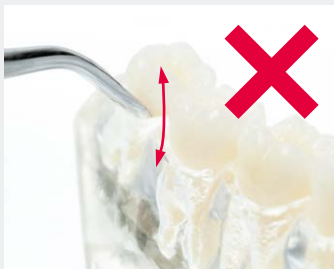

ACHTUNG! Es ist nicht vorgesehen, diese Instrumente hebelnd einzusetzen.

ATTENTION! Don't use the instrument as a lever.



ACHTUNG! Bitte vermeiden Sie die punktuelle Überbelastung des Instruments auf der absoluten Spitze. Dies kann zum Ausbrechen des Arbeitendes führen.

ATTENTION! Please avoid any punctual overloading of the instrument on its absolute tip, as the working tip might break off.

Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

We cannot assume any liability for damages caused by improper use of the instruments.



614-30