



SAFE-EX
DBGM

1033-60 Aufbereitung und Pflege

Pflege und Aufbereitung vom SAFE-EX Klingenhalter

DEMONTAGE:

Der SAFE-EX Klingenhalter ist vor der Reinigung, wie abgebildet, zu demontieren.

Achtung: Feder nicht entfernen.

REINIGUNG:

Bei allen Reinigungsvorgängen ist stets unsere „Anleitung zur Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Handinstrumenten und deren Zubehör nach DIN EN ISO 17664:2004“ zu beachten.

Vorreinigung: Bei starker Verschmutzung Reinigungsbürsten mit Nylonborsten verwenden.

Reinigung: Manuell oder maschinell – **Achtung:** Im Thermodesinfektor senkrecht stehend, mit Gewinde nach unten, reinigen.

Spülung: Möglichst deionisiertes Wasser verwenden, um Wasserflecken zu vermeiden.

Trocknung: Mit Druckluft oder an der Luft (manuelle Reinigung).

WARTUNG:

Mit Medizinischem Weißöl, wie gekennzeichnet, ölen.

MONTAGE:

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.




3297 50 ml


Paraffinum Perliquidum
(Paraffin Öl / Medizinisches
Weißöl)

Zur Pflege der Instrumente
mit Gelenk und zur Benutzung
als Schleiföl. Physiologisch
unbedenklich nach DAB 10.

1 Das Endstück gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen

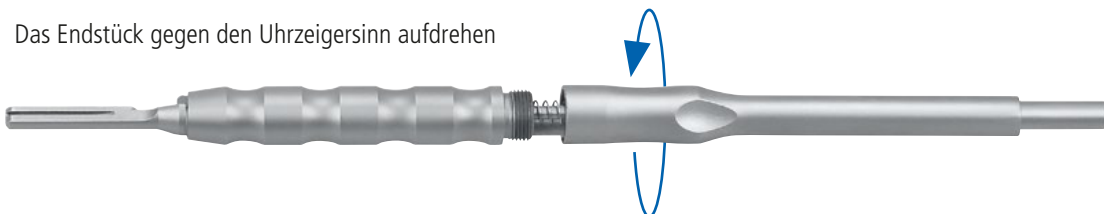

2 Entfernen des Endstücks und des Innenteils

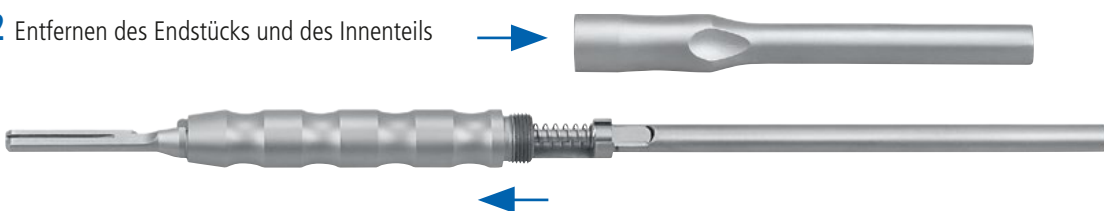

3 Nach der Reinigung ölen, z. B. mit Med. Weißöl

