



Pflegehinweise für Composite-Instrumente

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, daß Sie sich für ein hochwertiges SCHWERT Produkt entschieden haben.
Nachstehend ein paar Tipps zur Pflege:

- Die Instrumente dürfen nicht in Kontakt mit Amalgam treten (z. B. beim Legen von Füllungen bzw. durch Rückstände an den Handschuhen).
- Entfernen Sie Materialrückstände z. B. durch Abwischen mit einem Alkoholtuch noch am Stuhl, um ein Auftrocknen zu verhindern. Dadurch unterbinden Sie späteren manuellen Kraftaufwand, der unter Umständen zu einem Verkratzen der Oberfläche führen kann.
- Trocknen Sie die Instrumente gut vor der Sterilisation um die Bildung von Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie hierzu bitte ein weiches Baumwoll- oder ein Mikrofasertuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Edelstahl-, Messingbürsten oder Scheuermittel, verwenden Sie bei hartnäckigen Verunreinigungen nur eine harte Zahnbürste. Grobe mechanische Einwirkungen sind unbedingt zu vermeiden (abrasive Reinigungshilfsmittel wie z. B. Reinigungspads, durch Fremdpartikel verschmutzte Reinigungstextilien, etc.).
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmedien (extrem sauer / basisch, Scheuerwirkung).
- Bei Aufbereitung der Instrumente im Ultraschallbad bitte die Beschallungszeiten genau einhalten.
- Spülen Sie die Instrumente nach der Reinigung mit klarem Wasser, besser noch mit demineralisiertem Wasser.
- Bei Wannendesinfektion achten Sie bitte darauf, dass die Oberflächen nicht durch andere Instrumente beschädigt werden. Kontakt der Teile untereinander während der Reinigung / Sterilisation ist zu vermeiden (Gefahr von Kontaktkorrosion).
- Bei Thermodesinfektion empfehlen wir die Aufbereitung dieser Instrumente in einem Tray (siehe hierzu unsere Sets 4085-00TI, oder Tray 2599-05), um Beschädigungen auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Die Instrumentensets lassen sich problemlos in einer Sterilfolie einschweißen und können dort bis zu 6 Wochen gelagert werden (nach DIN 58953 Teil 7).

Wir möchten, dass Sie lange Freude an unseren Instrumenten haben und danken für Ihre Aufmerksamkeit.

