

UpDate!


1896 **SCHWERT**
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



Abdruckklöfel für Implantologie nach Helfgen Impression Tray for Implantology acc. to Helfgen

Modern Therapy · Modern Instruments

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

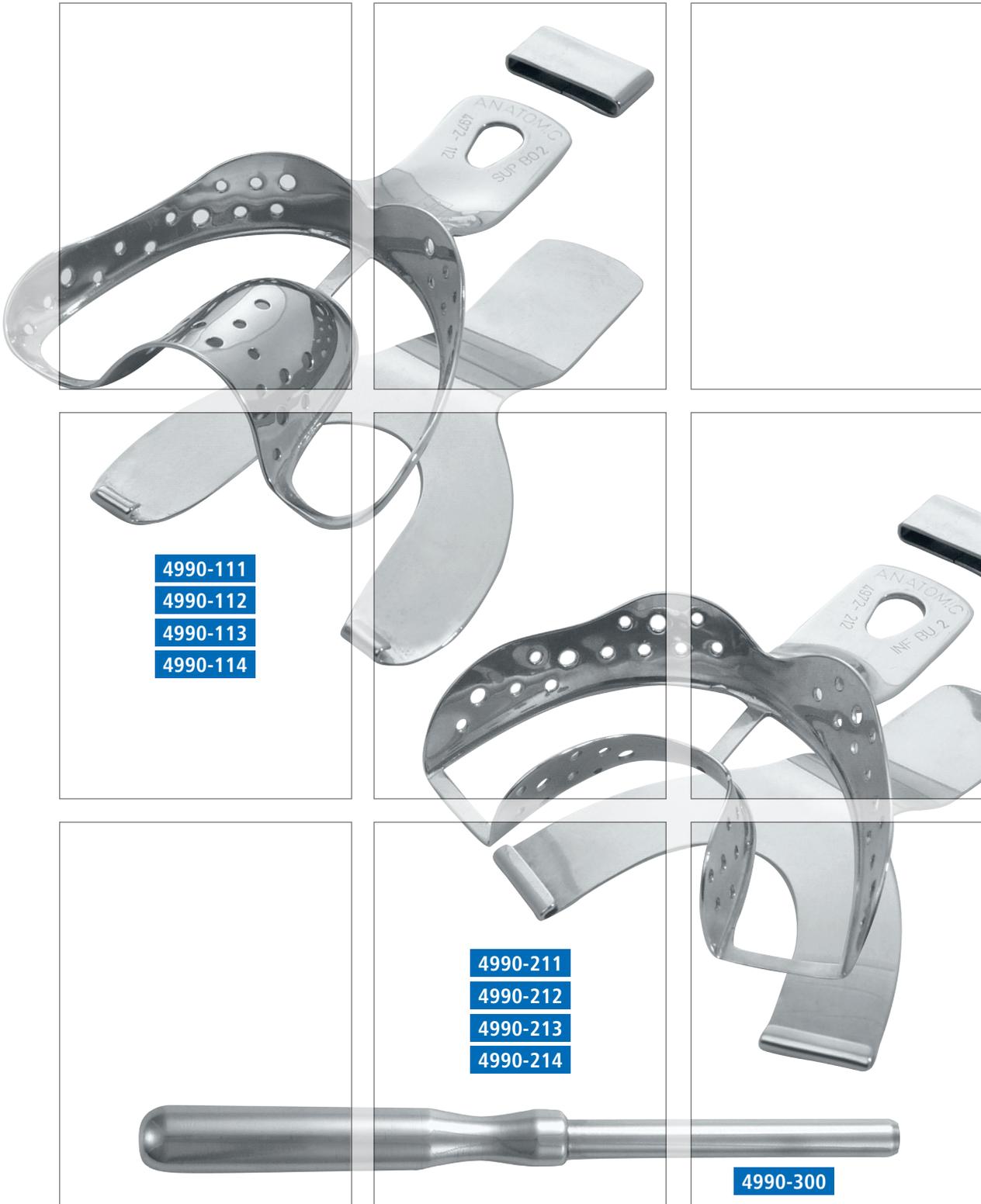

4990-111
4990-112
4990-113
4990-114

4990-211
4990-212
4990-213
4990-214

4990-300

MADE IN GERMANY

schwert.com



i

Abdrucklöffel nach Helfgen · Impression Tray acc. to Helfgen

Möglichkeit der Öffnung im okkusalen Bereich durch Abnahme eines arretierbaren Deckels. Zur Durchführung einer Korrekturabformung wird der Löffel zunächst mit aufgesetztem Deckel mit einem besonders harten Putty-Erstmaterial beschickt und auf der Zahnreihe platziert.

Possibility of an opening in the occusal area by removal of a lockable lid.

In order to make a corrective impression, at first the impression tray is charged with very hard Putty impression material and then placed on the alignment with locked lid.

Nach Aushärtung und Entfernung wird der Abdruck wie gewöhnlich beschnitten und zur Kontrolle reponiert. (Abb. 1)

As soon as the material is hardened and removed, the impression is cut as usual and reset for control. (Pic. 1)

Nach Entfernung des Deckels ist das Abformmaterial im Bereich des Implantats in Größe des ausgewählten Abdruckpfostens zu perforieren. (Abb. 2)

After removal of the lid, the impression material has to be perforated in the implant region in the size of the selected impression post. (Pic. 2)

Anschließend wird der Abdruckpfosten eingeschraubt, der Löffel mit dünnfließendem Korrekturmaterial beschickt und nach intraoraler Umspritzung der Zähne und des Pfostens reponiert. Nach Aushärtung wird die Verschraubung gelöst und der fertige Abdruck entnommen. (Abb. 3)

Subsequently, the impression post is screwed in, the tray is charged with thin fluid correction material and after intraoral injection around the teeth and the post, the tray is set.

After hardening, the screwing is loosened and the finished impression is reset. (Pic. 3)



Abbildung
Illustration

Artikel-Nr.
Item-No.

Bestellmenge
Order Quantity



4990-111

Oberkiefer / Upper jaw SUP 1

[]

4990-112

Oberkiefer / Upper jaw SUP 2

[]

4990-113

Oberkiefer / Upper jaw SUP 3

[]

4990-114

Oberkiefer / Upper jaw SUP 4

[]



4990-211

Unterkiefer / Lower jaw INF 1

[]

4990-212

Unterkiefer / Lower jaw INF 2

[]

4990-213

Unterkiefer / Lower jaw INF 3

[]

4990-214

Unterkiefer / Lower jaw INF 4

[]



4990-300

Ausstecher / Perforator

[]