

# UpDate!

1896 **SCHWERT**  
**SWORD** SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN  
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



## Wurzelheber FIG. 77R Root elevator FIG. 77R

Modern Therapy · Modern Instruments



614-30

614-31

**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA



**614-30**

FIG. 77R

hervorragend  
geeignet für 8er  
perfectly suited  
for wisdom teeth

**614-31**

FIG. 77

Apical Wurzelheber,  
hervorragend ge-  
eignet für sämtliche  
5er, 6er und 7er bei  
distaler Anwendung  
Apical root elevator,  
perfectly suited for  
all pre-molars and  
molars with a distal  
approach



i

## Wurzelheber FIG. 77R

### Root elevator FIG. 77R



Aufgrund der Biegung des Instru-  
mentes ist ein sehr guter Zugang am  
Approximalkontakt zum 8er Zahn  
in allen Quadranten möglich. Die  
feine, gezahnte Spitze erlaubt ein  
schonendes Luxieren.

The angulation of the instrument  
secures an excellent access on the  
approximal contact to tooth no. 8 in  
all quadrants. The fine serrated tip  
allows a gentle luxation.



Die feine Maulrandzahnung stellt  
sicher, dass der Zahn beim Luxieren  
nicht vom Instrument abgleitet.

The fine serrated edges assure that  
the tooth will not slide from the  
instrument during luxation.



**ACHTUNG!** Es ist nicht vorgesehen,  
diese Instrumente hebelnd einzusetzen.

**ATTENTION!** Don't use the instru-  
ment as a lever.



**ACHTUNG!** Bitte vermeiden Sie die  
punktuelle Überbelastung des Instru-  
ments auf der absoluten Spitze. Dies  
kann zum Ausbrechen des Arbeitsen-  
des führen.

Für Schäden, welche durch unsach-  
gemäßen Gebrauch der Instrumente  
entstehen, können wir keine Haftung  
übernehmen.

**ATTENTION!** Please avoid any punc-  
tual overloading of the instru-  
ment on its absolute tip, as the working tip  
might break off.

We cannot assume any liability for  
damages caused by improper use of  
the instruments.

